

## Penispomp - Power Up



Deze penispompverlenger is ontworpen om uw penis onder vacuüm te trainen, wat kan helpen bij het voorkomen van voortijdige ejaculatie en impotentie. Gemaakt van hoogwaardige, medisch goedgekeurde materialen, biedt deze pomp een veilige en niet-giftige ervaring. Alle onderdelen zijn eenvoudig te monteren en schoon te maken, wat zorgt voor optimaal gebruikskomfort en hygiëne. De duidelijke schaalverdeling helpt u de groei van uw penis tijdens het gebruik te volgen.

Waardering Nog niet gewaardeerd

### Prijs

Basisprijs inclusief BTW € 19,95

Verkoopprijs: € 19,95

Korting

[Stel een vraag over dit artikel](#)

### Beschrijving

Deze penispompverlenger is ontworpen om uw penis onder vacuüm te trainen, wat kan helpen bij het voorkomen van voortijdige ejaculatie en impotentie.

Gemaakt van hoogwaardige, medisch goedgekeurde materialen, biedt deze pomp een veilige en niet-giftige ervaring.

Alle onderdelen zijn eenvoudig te monteren en schoon te maken, wat zorgt voor optimaal gebruikskomfort en hygiëne.

De duidelijke schaalverdeling helpt u de groei van uw penis tijdens het gebruik te volgen.?

Belangrijkste kenmerken:

- Functie: Pompen & Vergroeters?
- Kleur: Zwart?
- Afmetingen: 25 cm lengte x 7 cm diameter?
- Materiaal: ABS, siliconen en TPE?
- Technologie: Vacuum-hydraulisch voor een veiligere en comfortabelere erectie?
- Verpakking: Kleurendoos met afmetingen 25 x 11 x 7 cm?

### Gebruiksaanwijzing:

#### 1. Voorbereiding:

- Zorg ervoor dat alle onderdelen schoon en droog zijn voor gebruik.?
- Breng een royale hoeveelheid glijmiddel op waterbasis aan op de siliconen opening en uw penis voor een soepele invoer.?

#### 2. Gebruik:

- Plaats uw penis voorzichtig in de cilinder van de pomp.?
- Gebruik de pomp om langzaam een vacuüm te creëren, wat de bloedtoevoer naar de penis stimuleert en een erectie bevordert.?
- Houd de druk op een comfortabel niveau en vermijd overmatig pompen om ongemak of letsel te voorkomen.?

#### 3. Na gebruik:

- Laat het vacuüm langzaam los en verwijder de pomp voorzichtig.?
- Reinig alle onderdelen grondig met warm water en een mild reinigingsmiddel of een speciaal seksspeeltjes-reinigingsproduct.?
- Laat de onderdelen volledig drogen voordat u ze opbergt op een koele, droge plaats.?

### Schoonmaak:

- Demonteer de pomp na elk gebruik.?
- Reinig de cilinder, siliconen opening en andere onderdelen met warm water en een mild reinigingsmiddel.?
- Spoel grondig af om alle zeepresten te verwijderen.?
- Laat de onderdelen aan de lucht drogen of gebruik een schone doek.?
- Bewaar de pomp op een schone, droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht en extreme temperaturen.?

### Belangrijke opmerkingen:

- Gebruik de pomp niet langer dan 20 minuten per sessie.?
- Wacht minstens 2 uur tussen sessies om overmatig gebruik te voorkomen.?
- Als u pijn of ongemak ervaart, stop dan onmiddellijk met het gebruik en raadpleeg een arts.?
- Niet gebruiken als u bloedingsstoornissen, bloedverdunners of bepaalde medische aandoeningen heeft zonder eerst een arts te raadplegen.?

Door deze instructies te volgen, kunt u veilig en effectief gebruikmaken van de penis pompverlenger voor mogelijke verbeteringen in erectiele functie en penisgrootte.?

**100% discreet geleverd**

Om jouw privacy te waarborgen wordt jouw bestelling door ons verpakt en verzonden in een neutrale doos zonder naamsvermelding.

Zo komt niemand te weten wat jij besteld hebt.

**100% tevredenheidsgarantie**

Wij zijn pas tevreden wanneer jij als klant dat ook bent.

Daarom verkopen wij uitsluitend producten waarbij wij volledig achter de kwaliteit staan.

Heb je een vraag of suggestie? Neem dan gerust contact op met onze behulpzame klantenservice.